

POLUS 使用方法

<電源を入れる>

①電源コードを差し込む





②横のスイッチを上(I)にあげる



③タッチパネル下部の黄色く光っている箇所に2~3秒触れる



④タッチパネル立ち上がれば完了

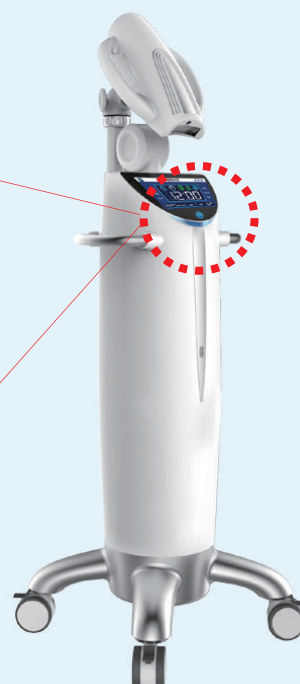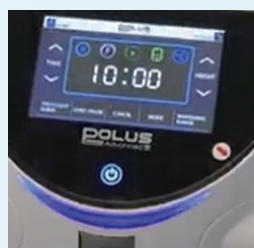


<セッティング>

⑤アームを持ち上げる



⑥アームの位置を調整する

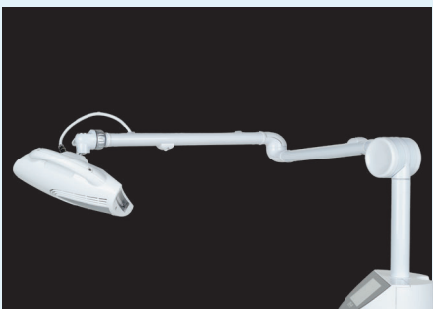

⑦アームの高さや照射時間、モード設定を行う



⑧⑦黄色のスタートボタンを押して照射開始



POLUS 使用方法

<照射を終了する>

⑨照射が終了するとカウンターが⑩に戻る




⑪アームを持ち上げる



⑩ライトが消灯していることを確認する



⑫アームを収納する

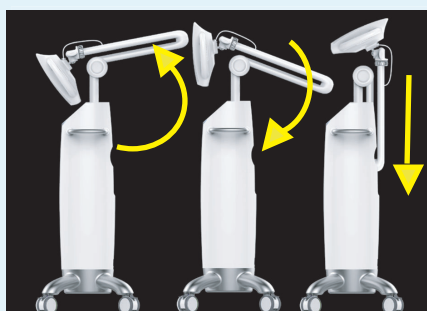


<電源を切る>

⑬タッチパネル下部の青く光っている箇所に2~3秒触れる



⑭ライトアームが自動で下がり、タッチパネルが消える

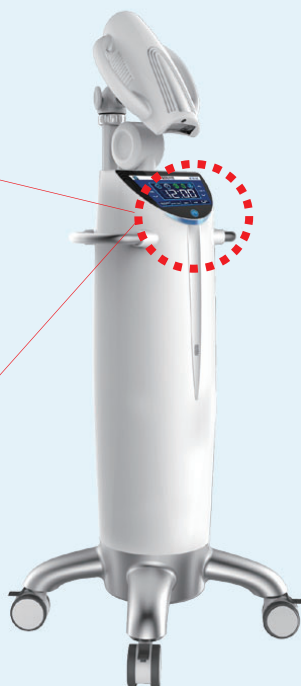

⑮冷却ファン停止確認後、スイッチを下(○)にさげる

